


הוראות שימוש למכשיר ה- NG shield

1

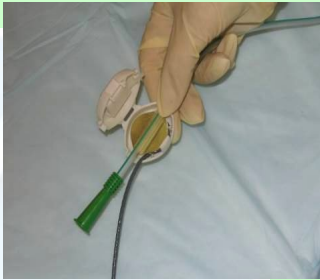

הוצא את מתמר הטיפול מאריזתו ומקם אותו בחלק האחורי (הדיסטלי) של הזונדה.
חשוב - אין להסיר את סרט ההדבקה בשלב זה!!

2





הרכב וסגור את מתמר הטיפול על הזונדה וחבר את הכבל עם הכבל היוצא מיחידת הבקרה.

3





הפעל את יחידת הבקרה ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה הנמצא בצידה העליון של יחידת הבקרה.
החדר את הזונדה למטופל דרך האף כאשר מכשיר ה- NG Shield פועל וניתן להרגיש בוויברציות לאורך הזונדה.

4

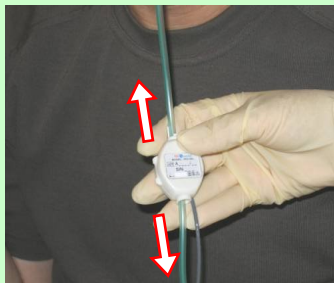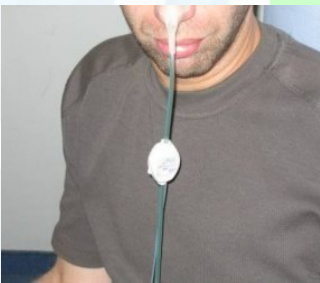

לאחר ההחדרה יש להזיז את מתמר הטיפול לאורך הזונדה ולמקם אותו לפי תגובתו של המטופל במיקום האופטימלי. קבע את הזונדה לאף בעזרת סרט הדבקה כמקובל.

5

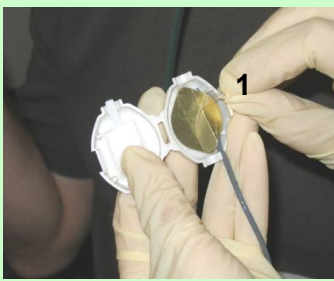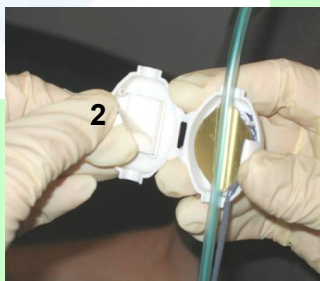

פתח את מתמר הטיפול, הסר את סרט ההדבקה בשני הצדדים (1,2) וקבע את המתמר אל הזונדה במיקום הרצוי. סגור את המתמר בחזרה.

מחון
הדלקה/כיבוי

מחון
פעילות

מחון חיבור
למתמר
הטיפול



מחון טעינת
סוללה

חיוויים והתראות:

<u>פעולה</u>	<u>חיווי</u>
סוללה חלשה – החלף יחידת בקרה וטען את הסוללה.	הנורה התחתונה במחון הטעינה מהבהבת ונשמע חיווי קולי (אזעקה).
מדבקת הטיפול מנותקת – בדוק כי כבל המדבקה מחובר היטב.	מחון חיבור למתמר הטיפול דולק ונשמע חיווי קולי (אזעקה).
יחידת הבקרה כבויה - הדלק את יחידת הבקרה. - אם היחידה אינה נדלקת, החלף וטען את היחידה.	כל המחוונים אינם דולקים.